



FENTANYYLITESTIN PIKAOHJE LÄÄKETABLETTIEN TESTAAMISEEN


Testiliuskalla voi testata ennen aineen käyttämistä, onko siinä fentanyyliä. Testiliuskat on alun perin tarkoitettu aineen testaamiseen virtsasta. Testi tehdään veteen liuotetun jauheen jäämästä, jotta pitoisuus olisi yhtä laimea kuin virtsassa. Fentanyylit eivät sekoitu tasaisesti muihin aineisiin, joten **testaa koko pilleri**.

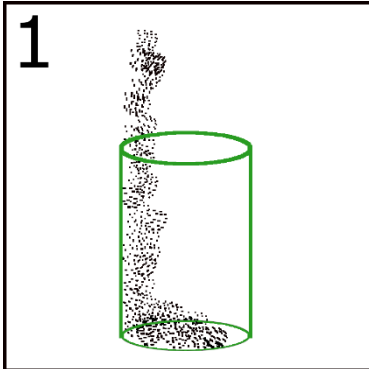


1
Kaada murskattu lääkepilleri kuppiin

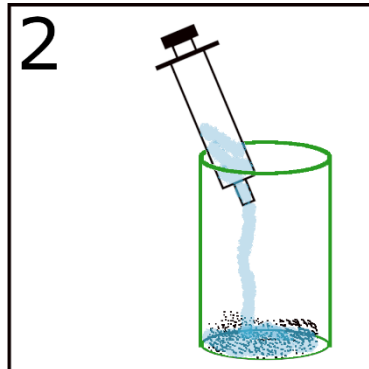


2
Sekoita murska 1-2 ml:aan vettä

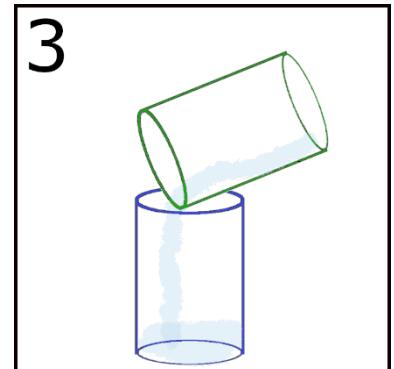


3
Kaada seos toiseen kuppiin ja laita siihen kansi päälle

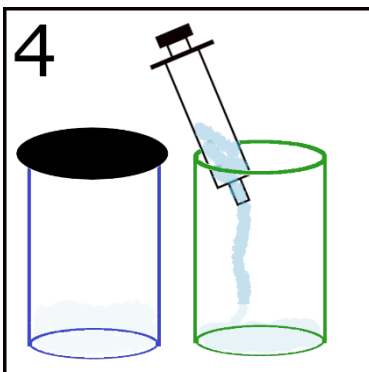


4
Lisää ensimmäiseen kuppiin 1 ml vettä

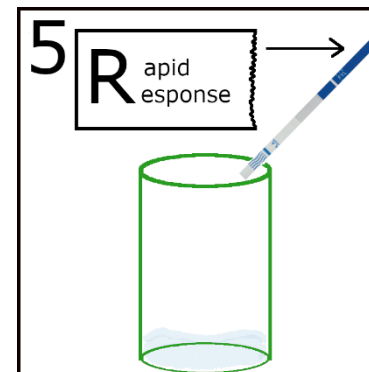


5
Ota testiliuska ulos paketista

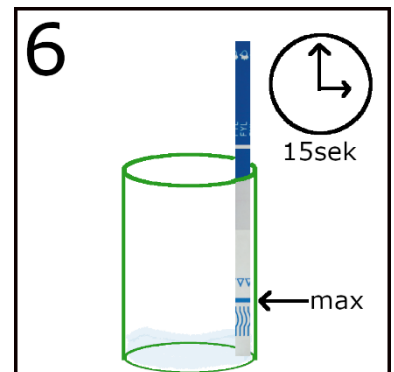

6
Kasta liuskan valkoinen pää veteen 15 sekunnin ajaksi

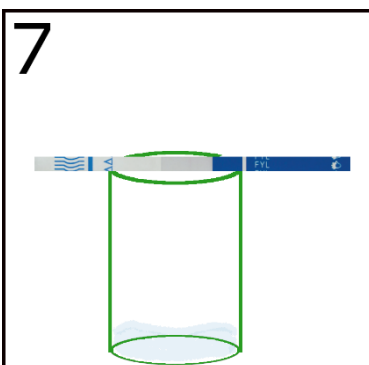

7
Aseta testiliuska kuivumaan. Neste alkaa liikkua kohti sinistä päätä.

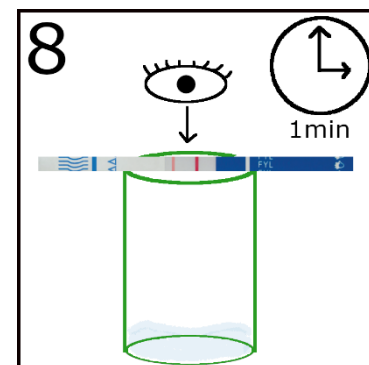

8
Tulkitse tulos noin minuutin päästä, vasta kun neste on liikkunut liuskan siniseen pätyyn asti

Ohjeet tulokset tulkitsemiseen seuraavalla sivulla →

Tuloksen tulkinta

Testiliuskaan ilmestyvät viivat voivat olla vahvoja tai himmeitä. **Himmeäkin viiva lasketaan viivaksi. Merkitystä on vain viivojen määrällä ja mihin kohtaan viiva ilmestyy.**

Testejä jakavat tahot eivät ole vastuussa jonkun muun tekemän testin tai sen tuloksen tulkinnan luotettavuudesta. Voit palauttaa positiivisen testin liuskoja jakavalle taholle ja keskustella henkilökunnan kanssa tuloksesta.

Yksi punainen viiva liuskan yläpäässä ↓



Testi on positiivinen fentanyylille



Kaksi punaista viivaa ↓ ↓




Testi on negatiivinen fentanyylille



Vaikka testi ei tunnista aineessa fentanyyliä, se ei tarkoita, että aine olisi turvallista. Aine voi silti sisältää muita vaarallisia opioideja tai muita vaarallisia aineita!

Yksi punainen viiva liuskan alapäässä tai ei yhtään viivaa

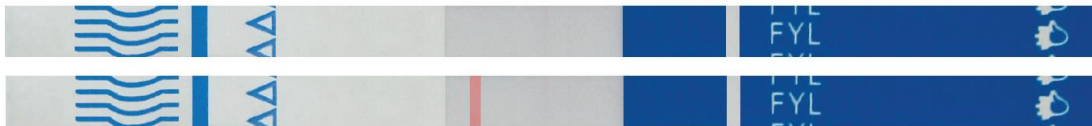

Testi epäonnistui

Testi epäonnistui



Voit halutessasi testata myös virtsaasi, jolloin voit vain kastaa liuskan valkoista päätä virtsaan 15 sekunnin ajan. Näin voit selvittää oletko käyttänyt tietämättäsi fentanyyliä eilen tai toissapäivänä.